

Lavaggio Mascherine Anatomiche Già:

a mano, temperatura massima di 60° con detersivo per bucato o additivo igienizzante; NON stirare

Sanitizzazione

Metodo 1:

Immergere e lasciare in ammollo le mascherine per 10 min. in una soluzione di ipoclorito al 5% pari a circa 2 cucchiaini di candeggina in un litro d'acqua.

Lavare a mano con detersivo da bucato con acqua a 40°.

Eseguire la sanificazione dopo ogni utilizzo giornaliero.

Metodo 2

- Effettuare un accurato lavaggio delle mani
- Togliere la mascherina indossata sul viso utilizzando gli elastici e cercando di evitare di toccarla nella sua parte interna.
- Lavarsi nuovamente le mani, indossare un paio di guanti monouso o in alternativa sanitizzare le mani con una soluzione
- idroalcolica al 75-85% o altro disinfettante idoneo.
- Adagiare la mascherina su una superficie precedentemente pulita con la parte esterna verso l'alto
- Spruzzare uniformemente la **soluzione idroalcolica al 65-70%** su tutta la superficie
- compreso gli elastici ma senza eccedere nella bagnatura
- Girare la mascherina e ripetere l'operazione.
- Lasciare agire la soluzione fino a completa evaporazione in un luogo protetto (almeno 30 minuti) In caso di
- persistenza di odore di alcool si consiglia di lasciare ulteriormente asciugare
- riporre la mascherina in una busta di plastica fino al nuovo uso.

Fonte: I.d.L. sanitizzazione mascherine S.C.F.M. Firenze

NOTA:

PREPARAZIONE A VOLUME PER OTTENERE 1 LITRO ALLA GRADAZIONE SPECIFICA:

Dosi espresse in ml

gradi	Alcool 96° (bianco)	Acqua	
75°	781	219	
70°	729	271	
65°	677	323	